




## Systeme de commande occipitale DSL-105

**DX**<sup>TM</sup>

LA  
SOLUTION DE  
COMMANDE  
DE FAUTEUIL  
ÉLECTRIQUE  
PAR  
EXCELLENCE

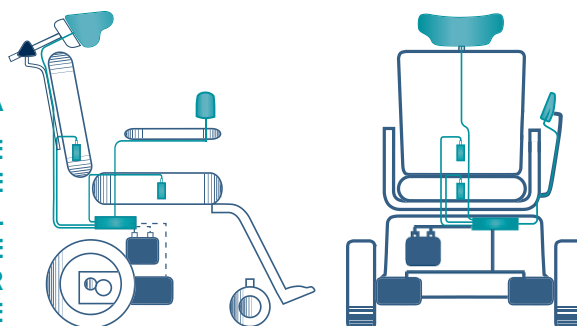

dynamic<sup>TM</sup> 

DSL-105

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## Mode d'emploi

Pour garantir votre sécurité et celle d'autrui lorsque vous utilisez la commande occipitale DSL-105, veuillez suivre les consignes suivantes :



S'il est activé, la commande occipitale ne doit pas être utilisée comme appui-tête ni repose-tête car le fauteuil commencerait à rouler dès que la tête s'approche des coussinets.

- **Éteignez le fauteuil avant d'utiliser la commande occipitale comme repose-tête.**



Les capteurs de la commande occipitale sont sensibles à l'eau. Cela signifie que la présence d'une quantité suffisante d'eau à proximité des capteurs risque de les activer et d'entraîner le démarrage du fauteuil.

- **N'utilisez pas la commande occipitale les cheveux mouillés**, en portant un vêtement humide sur la tête ou autour du cou, quand il pleut ou dans les situations où de l'eau risque de se trouver à proximité des capteurs.



Les coussinets des capteurs sont en vinyle hydrofuge. Cette toile permet à l'eau ou à la transpiration de s'écouler rapidement avant l'activation des capteurs.

- **Ne recouvrez pas les coussinets des capteurs** de quoi que ce soit (de tissu, par exemple, pour un plus grand confort). Si les coussinets sont recouverts d'un tissu qui absorbe l'eau, cette dernière restera sur les coussinets, le fauteuil roulera et ne s'arrêtera pas tant que l'eau n'aura pas séché.
- Vérifiez régulièrement l'état d'usure des coussinets de la commande occipitale. **Si la toile de vinyle est fissurée ou endommagée, n'utilisez pas la commande occipitale** et faites remplacer la toile sans délai. Si la toile est trouée, de l'eau peut pénétrer dans les coussinets, activer les capteurs et provoquer le démarrage du fauteuil.



Les capteurs de distance sont sensibles aux ondes électriques que transmettent notamment les dispositifs de communication mobiles et les portes de sécurité à serrure électronique.

- N'utilisez pas le DSL-105 à proximité d'un appareil qui transmet de fortes ondes électriques. Le fauteuil risquerait de démarrer de manière inattendue.



Si tel est le cas, **éteignez le fauteuil en appuyant**

- **sur le bouton on/off** ou
- sur le bouton Mode (uniquement en mode 3Q).

**Remarque :** ces consignes de sécurité sont données à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas la formation obligatoire de l'utilisateur.