

Enhandsbroms, One hands brake, Die Einhandbremse, Commande de freinage à une main

- SV** OBS! Enhandsbroms får endast användas i kombination med medföljande handtag eller HP-handtag.
- GB** N.B. One-hand brake may only be used in combination with accompanying HP- or handle.
- DE** Bitte beachten Sie, dass die Einhandbremse nur zusammen mit dem beige-fügten Handgriff oder einem HP-Handgriff angewendet werden darf.
- FR** Attention! La commande de freinage à une main ne doit être utilisée qu'en combinaison avec la poignée jointe, sans poignée de frein, ou poignée pour hémiplégique.

Handtag/Handle/Handgriff  
**DOLOMITE MELODY L, M, SOPRANO**  
 Art no 13585-L, 13585-R  
**DOLOMITE MELODY S**  
 Art no 13586-L, 13586-R  
 HP-handtag/-handle/-handgriffe  
 Art no12641

Monteringsanvisning Assembly instruction Montageanleitung Instructions de montage

**SV** Parkeringsbroms på höger sida ska aktiveras.  
**GB** The parking brake on the right side shall be activated.  
**DE** Die Feststellbremse auf der rechten Seite wird aktiviert.  
**FR** Le frein de stationnement sur le côté droit doit être actionné.

**1** **DOLOMITE MELODY** **DOLOMITE SOPRANO**

**SV** Visar montering på höger sida.  
**GB** Shows assembly on the right side.  
**DE** Zeigt die Montage auf der rechten Seite.  
**FR** Indique le montage sur le côté droit.

**2** **x 1** **T 20** **3**

Torx-nyckel  
 Torx-key  
 Torx-schlüssel  
 Clé six-pans  
 T 27

Vänster+Höger  
 Left+Right  
 Linke+Rechte  
 Gauche+droit

**3** **x 2**

**SV** Enhandsbroms höger sida - vänster bromsstång bort.  
**GB** One-hand brake right side - left brake bar removed.  
**DE** Einhandbremse rechts Seite - linke Bremsstange weg.  
**FR** Commande de freinage à une main côté droit - barre de frein gauche enlevée.

**4** **x 1**

**SV** Höger sida  
**GB** Right side  
**DE** Rechte Seite  
**FR** Côté droit

**5** **# 4** **x 1**

**SV** Höger sida  
**GB** Right side  
**DE** Rechte Seite  
**FR** Côté droit

**6** **6a** **6b**