

# Invacare® EC-Track™

da **Kontrolliste til sikkerhedseftersyn**



Denne manual SKAL overdrages til slutbrugeren.  
Denne manual SKAL læses FØR brug af dette produkt og gemmes til fremtidig brug.



**Yes, you can.®**

## Installationstjekliste | EC-Track-system, Gantry og Robin

Skinnesystemet og/eller personløfteren er blevet kontrolleret og testet for følgende i henhold til **Vejledningen/installationsmanualen**:

Er EC-Track på installationen?

**Ja** (fuldfør følgende afsnit).


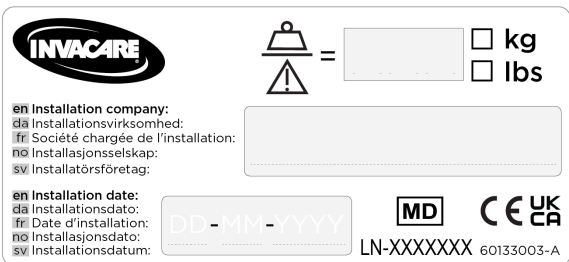
Installationsmærkatet for Invacare EC-Track-systemet viser følgende oplysninger:			
Maksimal sikker arbejdsbelastning (SWL)		Installationsdato	
Mærkatnummer (LN)			

### Type installation

Type af skinnesamling	<input type="checkbox"/> Lige/bøjede skinne(r)	<input type="checkbox"/> Krydsende (X-Y-system)	<input type="checkbox"/> Værelse-til-værelse
Værelsestype	<input type="checkbox"/> Soveværelse	<input type="checkbox"/> Badeværelse	<input type="checkbox"/> Stue
Fastgørelse	<input type="checkbox"/> Loft	<input type="checkbox"/> Væg	<input type="checkbox"/> Gulv til loft (vægstolpe)
Forstærkninger	<input type="checkbox"/> Nej	Ja, udført af: <input type="checkbox"/> Installatør <input type="checkbox"/> En anden entreprenør: _____	

**Nej** (Gå til **2. Kontrolpunkter | Robin** og sørg for at kontrollere skinnernes producent **Vejledning/installationsmanual**).


1. Kontrolpunkter   EC-Track og Gantry	✓	✗	Bemærkninger
1.1 Alle nødvendige forstærkninger er forsvarligt fastgjorte (hvis relevant).			
1.2 Skinnesystemets komponenter vælges og monteres i overensstemmelse med <b>Installationsmanualen</b> .			
1.3 Beslagene er placeret under deres nominelle maksimale afstandsforhold. Hvis det er Gantry-systemet, er stolperne placeret under deres nominelle maksimale afstand.			
1.4 Alle beslag er fastgjort korrekt til loftet/væggen.			
1.5 Beslaget til skinnefastgørelse er sat forsvarligt fast. Hvis det er Gantry-systemet, er alle forbindelser forsvarligt fastgjorte.			
1.6 Alle skinneender er udstyret med endestop, som er tilstrækkeligt fastspændt og har endestykker (hvis relevant).			
1.7 Skinnerne er rene og fri for spåner eller andet affald fra installationen.			
1.8 Kørevognen (og, hvis relevant, krydsende kørevogne) kører jævnt og stille i hele skinnesystemet.			
1.9 Justér friktionsbremsen på kørevognen, hvis det er nødvendigt.			
1.10 Kontrollér monteringsanordningerne på krydsende kørevogne.			
<b>Transitkobling/skinneskifter</b> (hvis relevant)			
1.11 Låseanordningerne er alle OK (sikker sporing, hver hægte bevæger sig uafhængigt, korrekt justeret i forhold til sporingrillerne, ingen forhindring der hindrer korrekt funktion, sikkerhedsplade er monteret).			
1.12 Kontrollér skinnernes indbyrdes placering. Justér igen, hvis det er nødvendigt.			
1.13 Afstand mellem spor og transitkobling/skinneskifter er maks. 3 mm.			
1.14 Transitkobling/låseanordning virker OK (10 gange: Deaktiver venstre/højre klo x 5).			
1.15 Funktionstest udført under belastning gennem systemets skinneskifter (5 cyklusser med den maksimale sikre arbejdsbelastning (SWL)).			

1. Kontrolpunkter   EC-Track og Gantry	✓	✗	Bemærkninger		
1.16 Indlægspladen er monteret (L- og M-skinne).					
<b>Belastningstest</b>					
1.17 Kontrollér, om skinnesystemet er nivelleret (før test af skinnesystemet).					
1.18 Skinnen skal derefter belastes med 300 kg – 1,5 × maksimal sikker arbejdsbelastning (SWL) (200 kg) – i 20 minutter.   Lasten skal ophænges under hvert fastgørelsespunkt i 20 minutter.			ISO 10535		
1.19 Skinnesystemet forbliver i samme højde efter belastningstesten.					
1.20 Skinnesystemet forbliver nivelleret efter belastningstesten.					
1.21 Skinnesystemet er blevet markeret med installationsmærkatet, der viser den maksimale sikre arbejdsbelastning (SWL) (200 kg), installationsdatoen og installationsfirmaet.					
1.22 Udfyld de ønskede felter på <b>Installationsmærkatet</b> og anbring det på skinnerne. Tildæk det med det beskyttende laminat.  					
1.23 Klæb en etiket med datoen for næste eftersyn (MM-ÅÅÅÅ) på skinnerne. <b>Mærkat eksempel:</b> <table border="1" data-bbox="92 1079 976 1164"> <tr> <td>Dato for næste eftersyn</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Dato for næste eftersyn				
Dato for næste eftersyn					

Er Robin personløfteren monteret på EC-Track?

- Ja (fuldfør følgende afsnit).
- Nej (Gå til **3. Afsnit om sidste trin** og sørg for at kontrollere personløfterens producent **Vejledning/installationsmanual**).


2. Kontrolpunkter   Robin	✓	✗	Bemærkninger
2.1 Robin personløfterens serienummer (skriv det i kommentarfeltet).			
2.2 Personløfteren er markeret med den maksimale sikre arbejdsbelastning (SWL) (200 kg).			
2.3 Op-afbryderne fungerer korrekt.			
2.4 Ned-afbryderne fungerer korrekt. Funktionen til at løsne stroppen fungerer korrekt. Kontrollér justeringen, hvis den ikke virker			
2.5 Endestop virker korrekt. Kontrollér justeringen, hvis den ikke virker.			
2.6 Nødstop og nulstilling virker korrekt.			
2.7 Nødsænkningfunktionen og nulstilling virker korrekt.			
2.8 Endestopsafbryderen ved nødsænkning fungerer korrekt.			
2.9 Den fulde længde af stropper (bånd) har ingen tegn på slid, trævling og/eller løs syning.			
2.10 Kroge og krogenes fastgørelse har ikke tegn på slid/skade, som kan true løftet.			
2.11 Håndbetjeningen er tilsluttet korrekt.			
2.12 Håndbetjeningen er funktionsdygtig og i god stand.			

2. Kontrolpunkter   Robin	✓	✗	Bemærkninger
2.13 Kontrollér affjedringen og krydstiften.			
2.14 Udfør en fuld løftecyklus med den maksimale sikre arbejdsbelastning (200 kg).   Skal være ubesværet og uden skurrende lyd.			

3. Afsluttende trin	✓	✗	Bemærkninger
3.1 Ejeren har alle nødvendige <b>Brugsanvisninger</b> .			
3.2 Affald fra installationen er samlet sammen og bortskaffet korrekt.			

#### Installation udført af:

<b>Virksomhed ansvarlig for systemet:</b> (fx leverandør, Center for teknisk bistand, Invacare osv.).	
<b>Installationsfirmaets navn:</b>	
<b>Installatørens navn</b> [blokbogstaver]:	
<b>Installatørens underskrift og dato:</b>	

 **To** underskrevne kopier af denne installationstjekliste skal udfyldes. Én til installationsfirmaet og én til producenten (Invacare). Send venligst en kopi (scannet dokument, PDF eller læseligt billede) til [ectrackinst@invacare.com](mailto:ectrackinst@invacare.com) med følgende navnekode: "**Installationsfirmaets navn**" + "**Mærkatnummer**" + "**Installationsdato**",

f.eks.: "**Invacare LN0000001 18-okt-2022**".







**Belgium & Luxemburg:**

Invacare nv  
Autobaan 22  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be

**Nederland:**

Invacare BV  
Galvanistraat 14-3  
NL-6716 AE Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

**United Kingdom & Ireland:**

Invacare Limited  
Pencoed Technology Park,  
Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
Tel: (44) (0) 1656 776 200  
uk@invacare.com  
www.invacare.co.uk

**Danmark:**

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
DK-2605 Brøndby  
Tel: (45) (0)36 90 00 00  
Fax: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

**Norge:**

Besøksadresse:  
(Office addresses)  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo  
Tel: (47) 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

**France:**

Invacare Poirier SAS  
Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

**Norge:**

Vareleveringsadresse:  
(Storage / Technical dep)  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo  
teknisk@invacare.com  
www.invacare.no

**Italia:**

Invacare Mecc San s.r.l.,  
Via dei Pini 62,  
I-36016 Thiene (VI)  
Tel: (39) 0445 38 00 59  
servizioclienti@invacare.com  
www.invacare.it

**Sverige:**

Invacare AB  
Fagerstagatan 9  
S-163 53 Spånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90  
Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se



Invacare Portugal, Lda  
Rua Estrada Velha 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal



Invacare UK Operations Limited  
Unit 4, Pencoed Technology  
Park, Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
UK

